

Ортодонтический набор SWISS DENTA

Предназначен для гигиенического ухода при ортодонтическом лечении брекет-системой.

Состав:

- зубная паста **paro® AMIN** на основе аминофторида 1250 ppm, 75 мл
- зубная щетка **paro® M43** средней жесткости, 4 ряда щетин, с монопучковой насадкой
- ополаскиватель полости рта **paro® DENT** с аминофторидом, 500 мл
- суперфлосс **EMOFORM Triofloss®** 100 шт.
- межзубные щетки **paro® ISOLA F Ø 1,9/6** мм, 5 шт.
- косметичка

Памятка для пациента

Утром, вечером и после каждого приема пищи:

- Чистка зубов и брекетов щеткой **paro® M43** и зубной пастой **paro® AMIN**
- Очистка труднодоступных мест, а также ортодонтических конструкций при помощи монопучковой насадки зубной щетки **paro® M43**
- Очистка ортодонтических конструкций с помощью межзубных щеток **paro® ISOLA F Ø 1,9/6** мм
- Очистка под мостами, имплантами, ортодонтическими конструкциями и между зубами при помощи суперфлосса **EMOFORM Triofloss**
- Ополаскивание полости рта ополаскивателем **paro® DENT**

ополаскиватель
полости рта

paro®
swiss
WILD

межзубные щетки
с держателем и
колпачком



зубная щетка с
монопучковой насадкой



суперфлосс



зубная паста



SWISS+TRADE

ООО Свисс Трейд

ул. Андрея Иванова 14, 01010 Киев

тел./факс: +380 44 288 50 78

info@swisstrade.com.ua

www.swisstrade.com.ua

предложенные схемы гигиенического ухода основаны
на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ),
Всемирной стоматологической федерации (FDI) и
Международной ассоциации стоматологических исследований (IADR)

ИДЕАЛЬНЫЙ ВЫБОР ДЛЯ
ЕЖЕДНЕВНОЙ ГИГИЕНЫ
ПОЛОСТИ РТА




paro® DENT ополаскиватель содержит комбинацию аминофорида и фторида натрия, которые предотвращают возникновение кариеса, снижают образование зубных отложений, помогают предотвратить заболевания пародонта и придают свежесть дыханию. Не содержит алкоголь.

paro® AMIN Зубная паста на основе аминофорида, благодаря которому предотвращает кариес, укрепляет зубную эмаль и сокращает образование зубного налата, а также предотвращает пародонтит. Для более надежной защиты десен содержит Пантенол.



Сменные насадки в серии **paro® ISOLA F** легко заменять. Узкий конец защитного колпачка выполнен в виде поворотного инструмента; поместите его над концом щетки, поверните на четверть оборота и выньте. Затем вставьте новую щетку в вырез в держателе и поверните на четверть оборота снова.

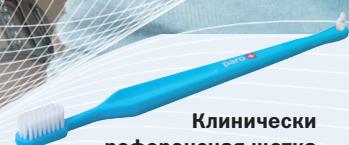

Клинически референсная щетка

Зубные щетки **paro®** в течении долгого времени являются эталоном в сравнении со всеми другими щетками, которые тестируются в Стоматологическом Университете Цюриха, Швейцария.



УХОД ЗА ЗУБАМИ И ПОЛОСТЬЮ РТА
Зубные пасты и ополаскиватели
полости рта



ЗУБНЫЕ ЩЕТКИ

Медицинские зубные щетки, детские зубные щетки и гидроактивные звуковые зубные щетки



МЕЖЗУБНАЯ ОЧИСТКА

Межзубные щетки, микро-щетки, зубочистки и зубные флоссы